

Codice	Descrizione	quantità
EASZ00041	AceScope (video laringoscopio riutilizzabile)	1
EASZ00141	AceScope Charging station wireless	1

Codice	Descrizione	quantità
OABZ08004	Ace Blade (lama monouso) misura e3 - 6 -7 mm vie aeree difficili - SENZA GUIDA	100
OABZ08003	Ace Blade (lama monouso) misura e3 - 6 -7 mm vie aeree difficili - CON GUIDA	100
OABZ09004	Ace Blade (lama monouso) misura MAC 1 - 2.5 -4 mm SENZA GUIDA	100
OABZ09003	Ace Blade (lama monouso) misura MAC 1 - 2.5 -4 mm CON GUIDA	100
OABZ07004	Ace Blade (lama monouso) misura MAC 2 - 4 -6 mm SENZA GUIDA	100
OABZ07003	Ace Blade (lama monouso) misura MAC 2 - 4 -6 mm CON GUIDA	100
OABZ05004	Ace Blade (lama monouso) misura MAC 3 - 6 -7.5 mm SENZA GUIDA	100
OABZ05003	Ace Blade (lama monouso) misura MAC 3 - 6 -7.5 mm CON GUIDA	100
OABZ06004	Ace Blade (lama monouso) misura MAC 4 - 7.5 -8.5 mm SENZA GUIDA	100
OABZ06003	Ace Blade (lama monouso) misura MAC 4 - 7.5 -8.5 mm CON GUIDA	100
OSTZ00001	Ace Stylet (stiletto monouso)	100



Touch Screen Video Laryngoscope



AceScope

Caratteristiche

- monitor LCD, touch screen per veloce programmazione
- monitor orientabile e angolabile ad alta risoluzione da 2,8 pollici
- design ergonomico
- registrazione foto e video
- possibilità di memorizzare 12 ore di video e 190 k di immagini
- stand by dopo 1 minuto di attività
- spegnimento automatico dopo 3 minuti di inutilizzo
- ricarica veloce in 3 ore
- tempo di autonomia (4h)
- lame monouso con rivestimento anti-appannamento tecnologia Macintosh
- possibilità di configurare lame con (o senza) guida per posizionamento del tubo endotracheale
- dati scaricabili e salvabili su Pc tramite uscita dedicata

Caricatore Wireless



AceScope

Video Laryngoscope
with Touch Screen

AceBlade

AceScope MAC 1



AceScope MAC 2



AceScope MAC 3



AceScope MAC 4



AceScope e3



Stylet(option)



TOUCH SCREEN




Foto (Salvare foto):

scattare foto toccando lo schermo con **un dito**



Video (Salvare video):

registrare e interrompere registrazione video toccando lo schermo con **due dita**

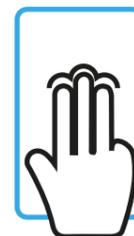

Informazioni:

accedere al menù principale, esplorare i file archiviati e modificare le impostazioni con **tre dita**

ideale per
intubazioni
difficili