

Lipipor™ TNA Filter

Codice prodotto (Europa): TNA2E

Descrizione

Questo prodotto reca la marcatura CE ai sensi della Direttiva sui dispositivi medici (93/42/CEE).

Indicazioni

Il filtro Pall Lipipor TNA è un filtro eliminatore d'aria autoinnescante dotato di membrana Supor® a basso legame proteico da 1,2 µm che consente la somministrazione di miscele libere da ftalati.

È indicato per la rimozione di particelle, aria, contaminanti microbici e macroaggregati lipidici che possano accidentalmente contaminare le miscele e le emulsioni lipidiche per nutrizione parenterale.

Questo prodotto è sicuro per l'uso con apparecchiature per infusione a pressione, ovvero pompe di infusione.

Controindicazioni

Il dispositivo non può essere utilizzato per filtrare frazioni cellulari del sangue o preparazioni notoriamente pirogeniche o contaminate da microrganismi.

Non è adatto per infusioni non continue.

Avvertenze

SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI

Materiale di costruzione (componenti a contatto con i fluidi)

Corpo filtro: acrilico

Setto filtrante: polieteresolfone (Supor) - idrofilo

Membrana per l'eliminazione dell'aria: politetrafluoroetilene (PTFE)/Poliestere - idrofobico

Tubo di prolunga: cloruro di polivinile (PVC) non ftalato (TOTM plasticizzato)

Connettore luer maschio: acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

Connettore luer femmina: PVC senza ftalati

Senza lattice naturale



Prestazioni

- 1. Rimozione dei contaminanti:** per la rimozione di particelle, aria intrappolata e macroaggregati lipidici (ossia >5 µm)
- 2. Rimozione microbica:** rimozione completa di un challenge totale di 108 CFU *Candida albicans* per 24 ore
- 3. Legame proteico:** contiene una membrana filtrante Supor a basso legame proteico.
- 4. Sostituzione raccomandata:** 24 ore Qualora il filtro venga collegato, in modalità asettica e in ambiente asettico, a un sistema di infusione e a un contenitore di preparato per infusione destinato ad una somministrazione di due giorni consecutivi, il filtro può essere utilizzato per un periodo fino a 48 ore
- 5. Massima pressione di esercizio raccomandata:** 200 kPa (2 bar, circa 30 psi, 1.500 mm Hg)
- 6. Massima portata raccomandata (con pompa o per gravità):** 500 ml/ora per miscele tipiche contenenti lipidi
- 7. Regimi di infusione:** Compatibile con tutti i regimi stabili di infusione parenterale standard compreso l'uso con flusso di gravità e pompe di infusione
- 8. Effetto sulla distribuzione di gocce lipidiche:** non influisce negativamente sulla normale distribuzione dimensionale delle gocce lipidiche

Spécifications

Setto filtrante

Dimensioni dei pori	1.2 µm
Superficie filtrante	circa 18 cm ²

Membrana per l'eliminazione dell'aria

Superficie filtrante	circa 0.44 cm ²
----------------------	----------------------------

Tubo

standard bore (diametro interno 3 mm/diametro esterno 4,1 mm), lunghezza di 7 cm a monte del filtro e di 25 cm a valle del filtro

Volume trattenuto (compreso il tubo)

circa 12 mL

Peso a secco

circa 16 g

Connessioni:

uscita luer maschio ISO e ingresso luer femmina ISO

Sterilità

tutte le parti destinate al contatto con i fluidi sono sterili (sterilizzate dai raggi gamma) e apirogene.

Validità

3 anni

Confezionamento

50 unità per scatola

Qualità

- Tutti i materiali delle parti a contatto con i fluidi soddisfano le sezioni attinenti della serie di normative ISO 10993
- Conforme a ISO 8536-11
- Connettori luer maschio e femmina conformi a ISO 20594-1 e EN 1707
- Sterilizzato in conformità con ISO 11137-1, ISO 11137-2 e ISO 11137-3
- Progettato e fabbricato mediante l'uso di sistemi di qualità conformi alle norme ISO 9001, ISO 13485 e alla Direttiva
- per i dispositivi medici 93/42/CEE

Filtro Posidyne NEO raffigurato in dimensioni approssimative



Dimensioni corpo filtro (circa)

Lunghezza: 6.9 cm

Larghezza: 4.2 cm

Profondità: 1.7 cm

Venite a trovarci sul web all'indirizzo www.cytiva.com/pallmedical

Cytiva e il logo goccia sono marchi di Global Life Sciences IP Holdco LLC o di una sua affiliata. Lipipor e Supor sono marchi di Global Life Sciences Solutions USA LLC o di una società affiliata che opera come Cytiva. Pall è un marchio di Pall Corporation. Tutti gli altri marchi di terze parti appartengono ai rispettivi proprietari.

© 2024 Cytiva

Tutti i beni e i servizi sono venduti in base ai termini e alle condizioni di vendita della società fornitrice che opera all'interno dell'azienda Cytiva. Una copia di tali termini e condizioni è disponibile su richiesta. Per informazioni più aggiornate, contattare il rappresentante Cytiva di zona. Per informazioni sui contatti degli uffici locali, visitare il sito cytiva.com/contact

240211.3IIT
03/2024

