

# ADHESION™

## COPERTURA ADESIVA PER SONDE

Una tecnologia innovativa senza lattice  
per un imaging più facile e sicuro



Talvolta sono le *piccole cose*  
a fare la *differenza più grande*.

### MAGGIORE VELOCITÀ E FACILITÀ DI UTILIZZO DELLA SONDA GRAZIE ALLA PERFETTA ADERENZA RESA POSSIBILE DALLA PUNTA ADESIVA CHE FISSA LA COPERTURA AL TRASDUTTORE.

A volte capita che la più semplice delle innovazioni cambi in modo significativo il nostro modo di lavorare. È questo il caso di Adhesion™, la straordinaria copertura adesiva per sonda, già tra le preferite dai tecnici del settore, in grado di cambiare per sempre il modo di eseguire l'imaging nelle procedure sterili.

- Più facile da utilizzare
- Copertura fissata al trasduttore mediante un nastro medicale adesivo
- Più facile da pulire
- Nessuna differenza nella qualità delle immagini
- Nessun residuo sul trasduttore
- Non è necessario applicare gel all'interno della copertura

Adhesion™ è dotata di una punta adesiva che fissa la copertura della sonda al trasduttore. In questo modo, si riduce il tempo necessario per preparare il trasduttore prima della procedura e, dal momento che non è necessario aggiungere gel all'interno della copertura, si elimina anche il tempo per la pulizia dello stesso al termine dell'utilizzo.

**LE COPERTURE PER SONDE ADHESION™ SONO IDEALI PER L'IMAGING DIAGNOSTICO, ENDOCAVITARIO E INTRAOPERATORIO. SE SI UTILIZZA UNA SONDA, ADHESION™ È LA COPERTURA DI CUI SI HA BISOGNO.**



Copertura sterile pronta all'uso



Individuare la piega centrale indicata dal simbolo della "mano"



Inserire la mano nella copertura e individuare l'adesivo



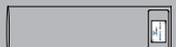
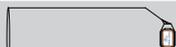
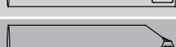
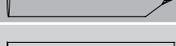
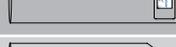
Applicare la copertura al trasduttore



Tirare la copertura fino a coprire tutto il trasduttore



Usare una piccola quantità di gel sterile o secondo quanto necessario

Codice	Descrizione	Dimensione	Pz./Conf.
 APC1296	Copertura adesiva Adhesion™ per sonde multiuso - con gel	10x60 cm	20
 APC1291	Copertura adesiva Adhesion™ per sonde multiuso - con gel	13x60 cm	20
 APC1416	Copertura adesiva Adhesion™ per sonde multiuso - con gel	15x60 cm	20
 APC1288	Copertura adesiva Adhesion™ per sonde multiuso - con gel	10x122 cm	20
 APC1289	Copertura adesiva Adhesion™ per sonde multiuso - con gel	13x122 cm	20
 APC1290	Copertura adesiva Adhesion™ per sonde multiuso - con gel	15x120 cm	20
 APC1295	Copertura adesiva Adhesion™ per sonde intraoperatorie - con gel	10x240 cm	20
 APC1308	Copertura adesiva Adhesion™ per sonde intraoperatorie - con gel	13x240 cm	20
 APC1292	Copertura adesiva Adhesion™ per sonde intraoperatorie - con gel	15x240 cm	20
 APC1292S	Copertura adesiva Adhesion™ per sonde intraoperatorie, punta dritta - con gel	15x240 cm	20

**Ecolab Healthcare**  
Puliti. Sicurezza. Igiene.

Microtek Medical B.V.  
Una divisione di Ecolab  
Hekkehorst 24  
NL-7207 BN Zutphen  
www.microtekmed.com

Ecolab s.r.l.  
Via Trento, 26  
I - 20871 Vimercate (MB)  
Telefono +39 039 6050.1  
www.ecolab.it

**MICROTEK**

**ECOLAB**